

Benodigheden

1. Tracoe Shower Guard



Pak de douchebeschermer en plaats deze om uw hals.



Druk het knopje door de opening van het bandje om deze vast te maken.



Plaats het kapje over de stoma en de tracheacanule heen.

Zorg ervoor dat de openingen van de douchebeschermer zich onder de stoma bevinden.



Reinig de douchebeschermer na gebruik met water en zeep.

Droog de douchebeschermer af met een pluisvrije doek.

LET OP!

Richt **NOOIT** een waterstraal direct op de hals of de stoma, omdat de douchebeschermer geen volledige afsluiting biedt. Ga in plaats daarvan met uw rug richting de douche staan of gebruik indien mogelijk een handdouchekop en zorg ervoor dat de waterstraal onder uw hals blijft om te voorkomen dat er water in de stoma terecht komt.

LET OP!

De douchebeschermer is **NIET** bedoeld om mee te baden of zwemmen.