

Benodigheden

1. Nieuw kompres
2. Benodigheden voor huidverzorging



Voer handhygiëne uit.



Haal het nieuwe kompres uit de verpakking en leg het opzij.



Houd met één hand de halsplaat op zijn plek terwijl u met uw andere hand het oude kompres met één kant tegelijk langzaam verwijdert.



Controleer de huid en stoma op tekenen van irritatie, beschadiging of ontsteking.



Voer huid en stoma verzorgingsroutine uit. Veeg de huid onder de halsplaat schoon met bijvoorbeeld een Tracoe reinigingsdoekje en laat de huid drogen.



Plaats een nieuw kompres tussen de halsplaat en de huid met de inkeping van het kompres naar uw kin gericht.

Gooi het oude kompres weg.



Bekijk hier de
instructievideo

TIP #1

Vervang het kompres iedere 24 uur of vaker, bijvoorbeeld wanneer deze vies is of als onderdeel van uw verzorgingsroutine.

TIP #2

Controleer bij het verwisselen de huid onder het kompres op tekenen van ontsteking, irritatie of huidbeschadiging. Bespreek uw bevindingen met uw behandelaar om te kijken welke kompres het meest geschikt is voor uw huid.

TIP #3

In sommige gevallen, zoals wanneer er sprake is van overmatig stoma-afscheiding of huidirritatie, kan het nuttig zijn om Provox Skin Barrier aan te brengen. Dit vormt een beschermend laagje tussen de huid en het kompres. Breng Provox Skin Barrier aan na reiniging van de huid en voordat u een nieuw kompres aanbrengt.

Fabrikant

Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1/3
55268 Nieder-Olm, Duitsland

Coloplast BV

Terminalweg 36-38
3821 AJ Amersfoort
Nederland

Nederland

Tel. +31 (0)79 593 50 00
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

België

Tel. +32 (0)2 334 25 25
order.be@coloplast.com
www.atosmedical.be

De in dit document verstrekte informatie is geen vervanging van de officiële gebruiksaanwijzingen van de getoonde producten. Raadpleeg altijd uw arts, clinicus of bevoegd zorgverlener voor advies met betrekking tot uw persoonlijke situatie en het gebruik van deze producten. Lees altijd de gebruiksaanwijzing (IFU) voordat u een product gaat gebruiken.

Atos en het Atos Medical logo zijn handelsmerken van Coloplast A/S.
©Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden

MC3017-BNL

Atos
Atos Medical, part of Coloplast