


Provox Life Oxygen is een adapter die op alle Provox Life pleisters, LaryTubes en LaryButtons aangesloten kan worden om toediening van bevochtigde ondersteunende zuurstof mogelijk te maken

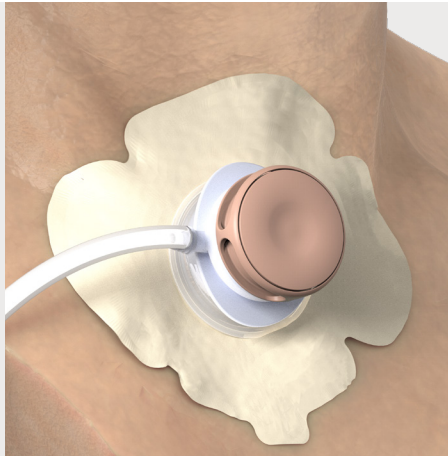


Dankzij het innovatieve ontwerp, wordt de toegediende zuurstof door de HME geleid, waardoor de zuurstof bevochtigd wordt vóór inademing

- Compatibel met alle Provox Life HME's*, pleisters, LaryTubes en LaryButtons.
- Leidt de ondersteunende zuurstof door de HME om te bevochtigen vóór inademing.
- Aanbevolen zuurstofslangdiameter (binnendiameter) van 3.2 mm (1/8 in.). Andere diameters kunnen worden gebruikt, maar moeten per situatie worden beoordeeld.
- Zuurstofconnector kan in elke richting geplaatst worden.
- Geschikt voor zuurstoftoediening tot 6 liter/min.
- Eén patiënt, éénmalig gebruik – elke 24 uur vervangen om de hygiëne van de patiënt te waarborgen.



Provox Life Oxygen


Provox Life Oxygen is compatibel met volgende producten:

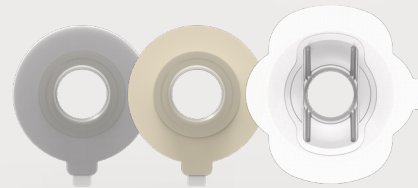

Provox Life Pleisters




Provox Life LaryTube en
Provox Life LaryButton

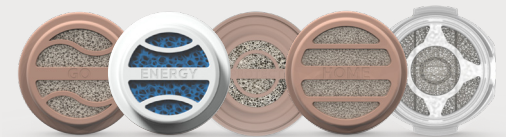


Provox Life HME's*

*Niet compatibel met Provox Life FreeHands HME


► BEVESTIGEN

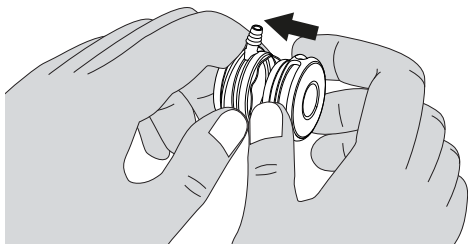


Houd de Provox Life Oxygen vast en bevestig deze aan de HME.

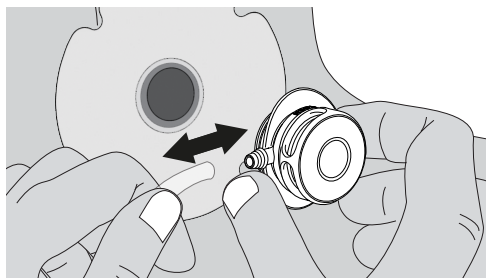

Bevestig de zuurstofslang nauwkeurig aan de zuurstofconnector. Verzekert dat de connector volledig in de slang zit.

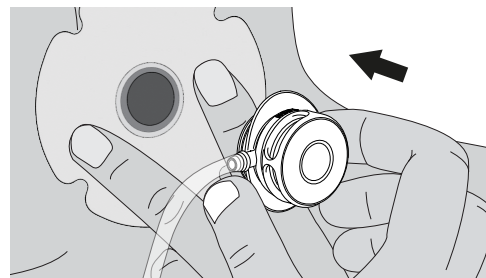


Bevestig Provox Life Oxygen op de Provox Life pleister.

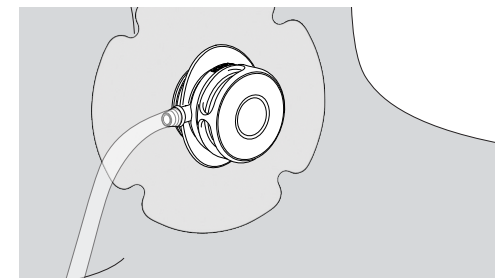


Controleer of Provox Life Oxygen goed is vastgeklit.

► SPREKEN

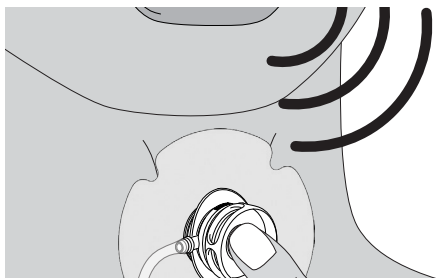

Met aangesloten zuurstofslang:


Sluit de HME af volgens de gebruiksaanwijzing van de HME.

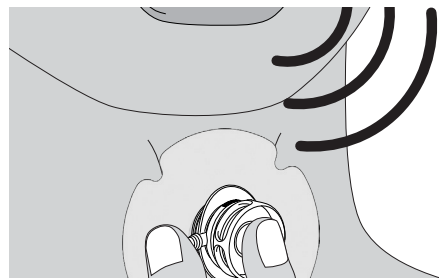

Zonder aangesloten zuurstofslang:


Sluit de zuurstofconnector met een vinger af en sluit vervolgens de HME af.

► VERWIJDEREN

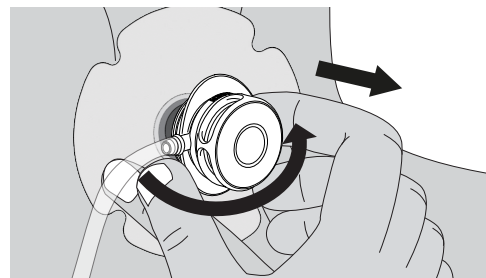

Van een Provox Life pleister:

Houd de Provox Life Oxygen vast en trek voorzichtig naar de zijkant tot deze losklikt.

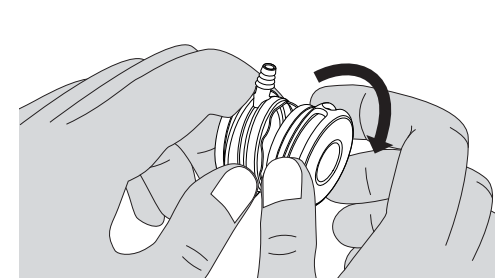

Verwijder de zuurstofslang van de zuurstofconnector en verwijder de Provox Life HME: Houd de Provox Life Oxygen vast en verwijder de HME.

Nederland

Tel. +31 (0)79 593 50 00
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

België

Tel. +32 (0)2 334 25 25
order.be@coloplast.com
www.atosmedical.be


Producent

Atos Medical AB
Kraftgatan 8
SE-242 35 Hörby, Sweden

Lees altijd de gebruiksaanwijzing (IFU) voordat u een product gaat gebruiken.

U vindt de gebruiksaanwijzingen op www.atosmedical.com.

© Coloplast A/S. All rights reserved. Atos and the Atos Medical logo are trademarks of Coloplast A/S.

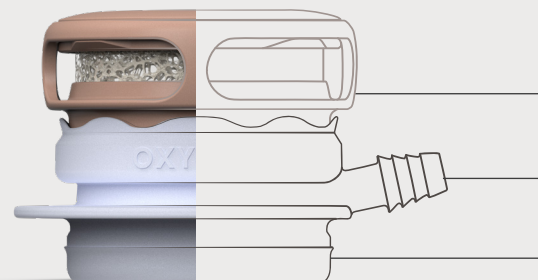

1 Compatibel met Provox Life HME assortiment
(M.u.v. Provox Life FreeHands HME)

2 Zuurstofconnector

3 Compatibel met Provox Life bevestigingen